

Ebandent®

MANUAL DE MONTAJE
DE MOBILIARIO DENTAL Y
LABORATORIO DENTAL

ÍNDICE

03. Embalajes

04. Montaje de mobiliario dental:

Desembalaje

Extraer cajones y puertas

Ensamblaje de módulos

Colocación del zócalo

Colocación de la encimera

06. Montaje de laboratorio dental

Desembalaje

Extraer cajones y puertas

Ensamblaje de módulos

Colocación del zócalo

Colocación de la encimera

08. Contacto

EMBALAJES

El mobiliario, tanto de clínicas como de laboratorios dentales, es el mismo, idénticas características técnicas, pero con distintos volúmenes de cajas, dependiendo del material solicitado. La diferencia más grande en cuanto a los embalajes en cuestión es si el transporte es marítimo o terrestre, que seguidamente les pasamos a detallar:


Transporte marítimo

Embalajes fabricados en madera de aglomerado hidrófugo con bolsa de anti-humedad en su interior.


Transporte terrestre

Embalajes fabricados en madera de aglomerado normal sin bolsa anti-humedad en su interior.

Caja para encimera de 208cm

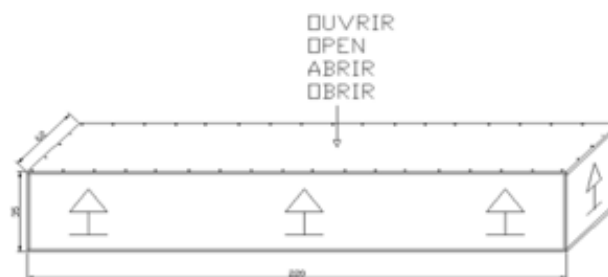


Caja para módulo estándar

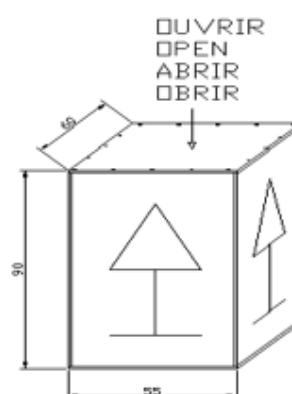

MONTAJE DE MOBILIARIO DENTAL

Despiece de un conjunto de 4 módulos estándar

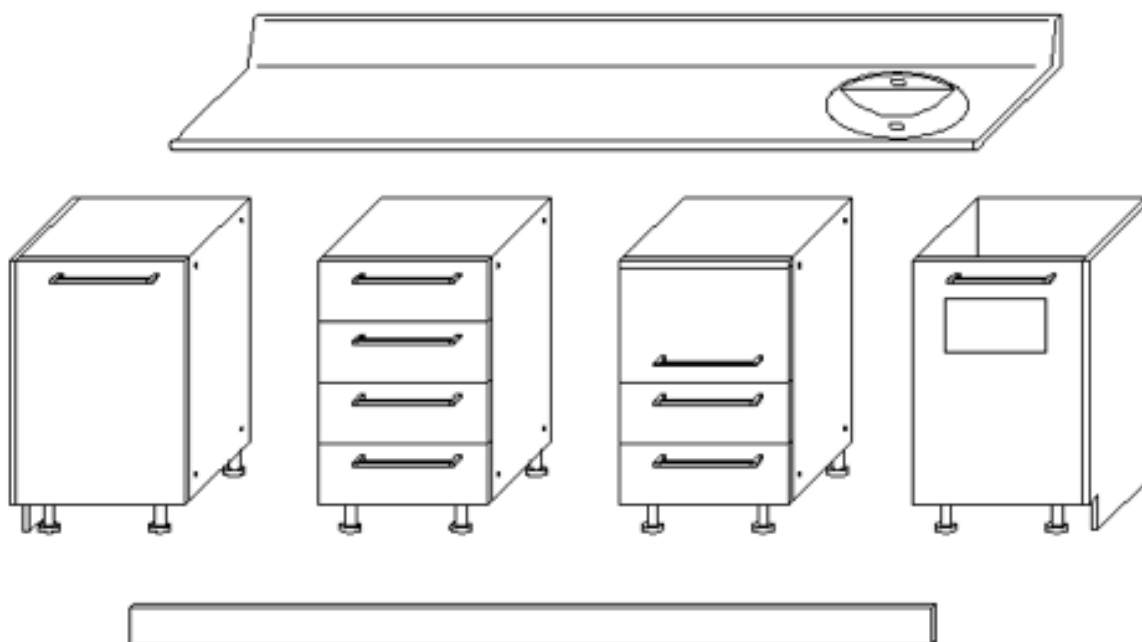

Los muebles para clínica dental, vienen todos probados de fábrica, así como marcados con indicaciones de donde hay que ensamblar cada elemento, es decir, todos los muebles que se envían, previamente han sido montados en fábrica para comprobar que todo es correcto. También se adjunta toda la ferretería necesaria para el montaje, pues una vez se desmonta en taller los herrajes se colocan en una caja de cartón en el interior del embalaje de la encimera.

Para comenzar el montaje, primero hay que extraer todo el material de los embalajes, los cuales no hay que devolver, verán que en el interior de las cajas vienen recubiertos con porexpan para una mayor protección de los muebles. Al abrir las cajas por la parte superior, hay que hacerlo con sumo cuidado para no dañar su contenido, nunca abrirlo con un destornillador haciendo palanca, siempre hay que desenroscar los tornillos de la tapa.


Para proceder al montaje, una vez hayamos sacado todo el material de los embalajes, hay que extraer todos los cajones y puertas de los módulos. Los cajones vienen numerados por la parte trasera, así como el interior de la caja del módulo, para facilitar la tarea de volverlos a colocar de nuevo, pues los cajones no son intercambiables.

Para sacar un cajón, hay que abrirlo del todo y tirar con fuerza hacia arriba, hasta escuchar un clic, acto seguido se saca el cajón hacia adelante, el funcionamiento de estas guías de cajones, es que vienen metidos por la parte trasera y con una grapa de presión por la parte delantera.


En el momento de colocarlos, hay que hacer el mismo proceso a la inversa, primero hay que sacar las contraguías del interior del módulo, colocar el cajón totalmente hacia atrás y ayudarnos con las manos para fijar la parte trasera del mismo, una vez sujeta, hay que bajar la parte delantera para que

MONTAJE DE MOBILIARIO DENTAL

se agarre la grapa con un clic, acto seguido hay que cerrar el cajón, este proceso ayuda a colocarlo correctamente en su sitio.

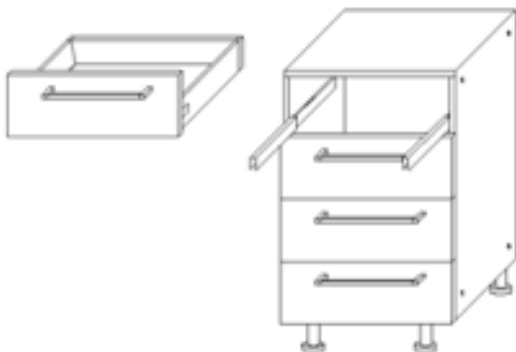

Las puertas hay que desarmarlas con una pestaña ubicada en la parte trasera de la bisagra, accionando hacia fuera para desbloquearla i que se descuelgue la puerta. Para su disposición, hay que colocar la bisagra en un enganche que hay en una pieza adherida al lateral de la caja y hacer presión en la parte trasera hasta escuchar un clic. Las bisagras tienen 3 tornillos para poder graduar las puertas hacia los 3 ejes, en principio no hay que tocar nunca estos tornillos, pues viene todo regulado de fábrica.

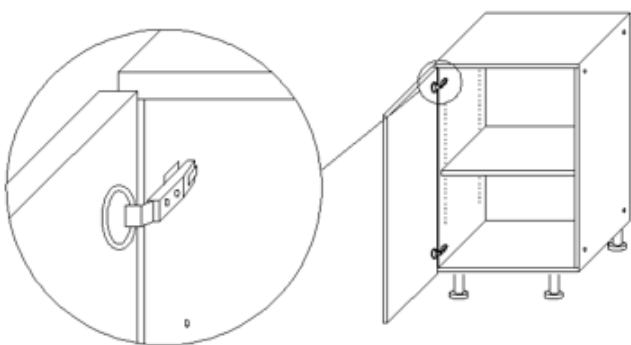

Los cajones y puertas vienen precintados para no sufrir desperfectos en el transporte.

En el desembalaje de la encimera, zócalo y herrajes, es necesario destornillar la tapa superior, idem a los módulos en el interior. Tal como apuntamos, encontrarán todos los


herrajes necesarios para el ensamblado del mobiliario.

Para proceder a su ensamblado, en el interior de las cajas de los módulos y de la encimera, vienen marcados por donde hay que atornillar cada pieza con una circunferencia pintada con un Edin, una vez juntados los módulos podemos proceder a nivelar correctamente el mueble, esto nos va a garantizar que los cajones y puertas, cuando se coloquen, siempre abran y cierren correctamente, siendo un punto importante. Una vez el mueble está nivelado y colocado en su posición final, podemos colocar el zócalo, éste viene cortado a la medida y comprobado como todo. Su colocación es a presión, con unas grapas de plástico que llevan en la parte posterior y la extracción es exactamente igual. Acto seguido podremos fijar la encimera, debiendo repartirla a partes iguales de izquierda a derecha y colocándola justo a ras del terminal, para verificar que la colocamos correctamente, es necesario que quede una volada de 3 cm. en la parte delantera y que coincidan los agujeros de los tornillos que se collan por debajo.

El montaje es sencillo, primero se ensamblan los módulos, recuerden que es importante nivelar bien el mueble, pues los suelos pueden variar, después colocar el zócalo y por último la encimera, una vez finalizado el montaje ya se pueden colocar los cajones y puertas. Así que enhorabuena el mueble está listo para poder trabajar!

MONTAJE DE MOBILIARIO DE LABORATORIO DENTAL

Despiece de una mesa de 2 puertas de trabajo

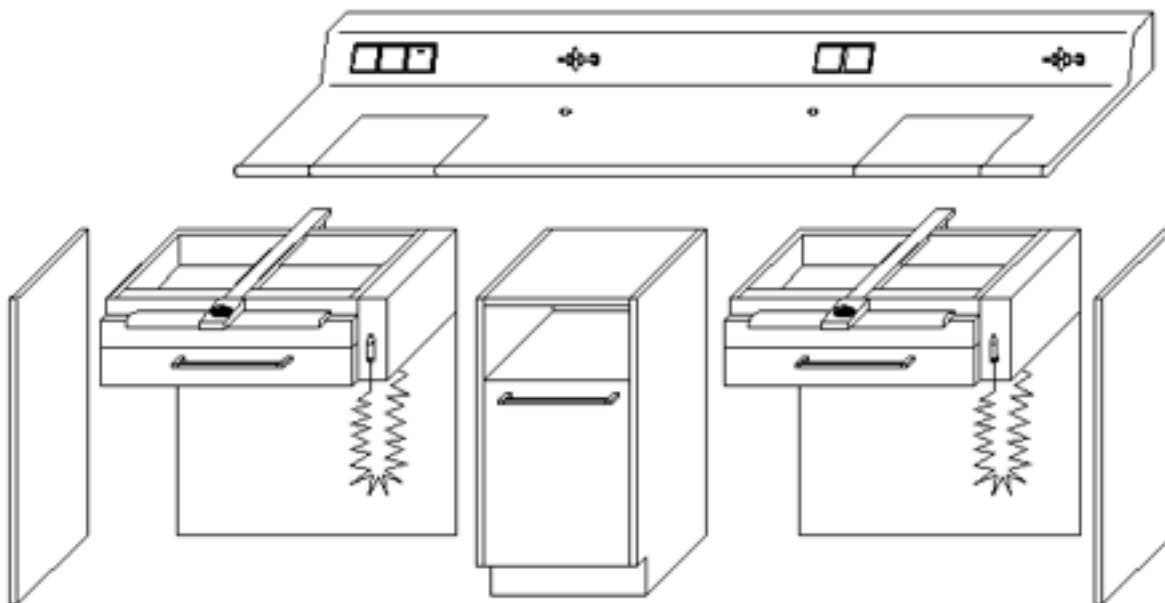

En este apartado, hay que diferenciar 2 tipos de mobiliario de laboratorio dental, las mesas protésicas y el mobiliario de apoyo. Para el mobiliario de apoyo para laboratorios, hay que seguir las mismas instrucciones que en el mobiliario para clínica dental, el montaje es exactamente el mismo, lo que cambia son los módulos.

En cuanto al montaje de las mesas, los embalajes vienen igual que en clínica, son cajas de madera de aglomerado de 19mm con distintas medidas, dependiendo del volumen del material y protegido con poliespan en la parte interior para una mayor protección.

Para proceder al montaje de las mesas, hay que desarmar los embalajes por las tapas superiores de las cajas, desenroscando los tornillos que las sujetan. En ningún caso apalancar dichas tapas, pues podríamos dañar su contenido. Los embalajes son desechables, no hay que devolverlos en

ningún caso, pero aconsejamos que, antes de tirarlos hagan primero el montaje de la mesa, por si existe alguna pieza defectuosa, entonces tendremos la posibilidad de volverlo a enviar con el mismo embalaje.

Para iniciar el montaje, hay que empezar por el buc central, donde hay el hueco para colocar el micromotor, seguidamente hay que atornillar los puestos de trabajo a dicho buc, viene marcado por unos círculos pintados con Edin, todo está perfectamente indicado, pues tal como hemos apuntado anteriormente, todo lo que se envía viene probado de fábrica. A continuación hay que colocar los 2 paneles traseros y los terminales laterales, en los que también podemos ver la marca por donde hay que atornillar. Llegados a este punto, la mesa ya se sostiene por si sola, pues cuando atornillamos los puestos de trabajo, éstos quedan un tanto suspendidos, pues solo hemos atornillado por un extremo. Una vez la parte baja esté perfectamente sujeta,

MONTAJE DE MOBILIARIO DE LABORATORIO DENTAL

podremos colocar la encimera, que viene con su copete integrado con todas sus instalaciones hechas, una vez atornillada la encimera por debajo, solo quedará hacer las conexiones de las instalaciones. Para saber si hemos realizado correctamente el montaje, todos los tornillos tienen que coincidir con los agujeros que hay del previo montaje en fábrica.

CONTACTO

Ante cualquier duda que tenga sobre el montaje o cualquier imprevisto relacionado con el mismo, se puede poner en contacto con nuestro equipo técnico que estará a su servicio para resolverlo. Hay distintas vías de conexión:

A través de nuestra página web www.ebandent.com, también puede ponerse en contacto a través del correo electrónico info@ebandent.com, por fax al número 0034 938 390 950, o al número de teléfono 0034 693 839 636 y si prefieren enviarnos correspondencia lo tienen que hacer a:

Eban.Cuin, S.L. (EbanDent)
C/ Llobregat, 7 Nave B
08670 Navàs
Barcelona

